


IQ-CATH ENGANGSKATETRE

PRODUKTBROCHURE

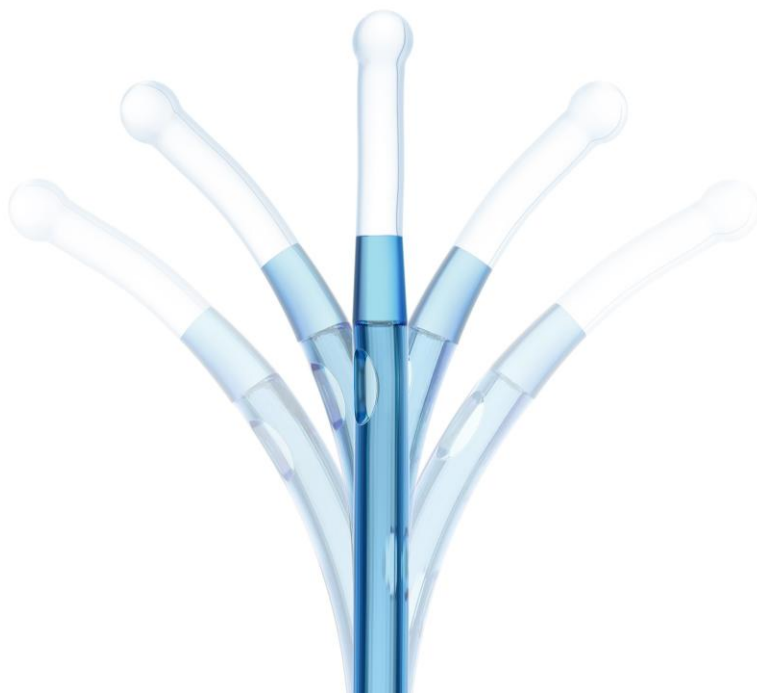

Engangskatetre til særligt
skånsom kateterisering

BERNIER

MEDICAL

MANFRED SAUER IQ-CATH – KATETRE MED KUGLEFORMET SPIDS

IQ-Cath specialkateter med bøjelig kugleformet spids er designet til personer, der kateteriserer sig selv (intermitterende kateterisering). Kateteret passerer særligt godt gennem urinrøret med strikturer, lommer eller bøjninger, men også gennem en spastisk lukkemuskel (sfinkter) eller forstørret prostata.

Spidsen på IQ-Cath består af et blødt kugleformet hoved placeret på en meget bøjelig "nakke". Denne kombination gør det muligt for kateteret at passere strikturer og udbugtninger i urinrøret næsten uhindret.

Kateterskafnets stivhed egner sig godt til selvkateterisering. Takket være sin konstruktion passerer kateteret let gennem urinrøret, og trykket mod urinrørsvæggen er lille.


IQ-Cath-kateteret har en universalkobling, der passer til alle standard urinopsamlingsposer på markedet.

IQ-Cath fås i væske (Klar-til-brug), med eller uden væske, samt i en rejsemødel med integreret væskepose og urinopsamlingspose.

IQ-Cath fås også med luer lock.

IQ CATH-KATETERETS EGENSKABER:

- bøjelig kugleformet spids - sikker og let at indføre.
- erstatter Tiemann, passerer gnidningsløst.
- passerer godt også ved spastisk urinrør.

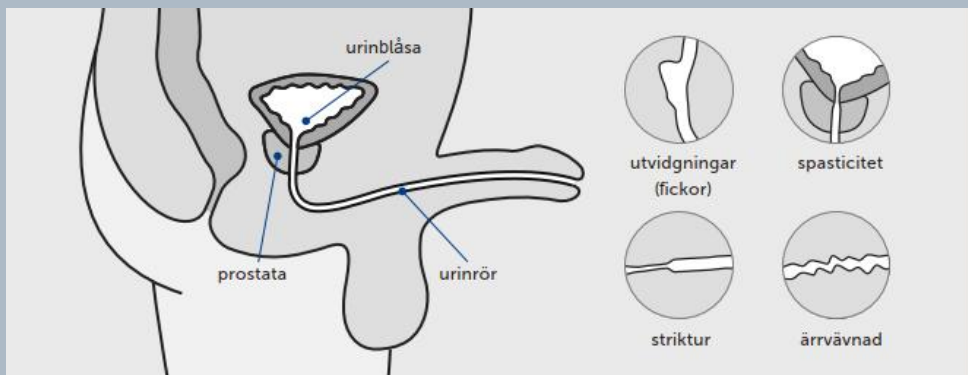

IQ2004.XX HYDROFILT KATETER UDEN VÆSKE

IQ2004.10
 IQ2004.12
 IQ2004.14
 IQ2004.16

Hydrofilt kateter uden væske. Aktiveres med 0,9 % saltvandsopløsning eller vand. Funktionel emballage, steril. Total længde 43 cm, effektiv længde 40 cm.



IQ2904.XX HYDROFILT KATETER UDEN VÆSKE

IQ2904.10
 IQ2904.12
 IQ2904.14
 IQ2904.16
 IQ2904.18

Hydrofilt kateter uden væske. Aktiveres med 0,9 % saltvandsopløsning eller vand. Peel-open emballage, steril. Total længde 43 cm, effektiv længde 40 cm.



IQ2104.XX HYDROFILT KATETER MED VEDLAGT VÆSKEPOSE

IQ2104.10
 IQ2104.12
 IQ2104.14
 IQ2104.16
 IQ2104.18

Hydrofilt kateter med integreret 0,9 % saltvandsopløsningspose. Funktionel emballage, steril. Total længde 43 cm, effektiv længde 40 cm.



IQ2304.XX HYDROFILT KATETER I VÆSKE, KLAR-TIL-BRUG

IQ2304.10
 IQ2304.12
 IQ2304.14
 IQ2304.16
 IQ2304.18

Hydrofilt kateter i væske, 0,9 % saltvandsopløsning. Klar-til-brug med det samme. Peel-open emballage, steril. Total længde 43 cm, effektiv længde 40 cm.



IQ4304.XX HYDROFILT KATETER I VÆSKE, KLAR-TIL-BRUG, MED SLEEVE

IQ4304.10
 IQ4304.12
 IQ4304.14
 IQ4304.16
 IQ4304.18

Hydrofilt kateter i væske, 0,9 % saltvandsopløsning. Klar-til-brug med det samme, med sleeve. Peel-open emballage, steril. Total længde 43 cm, effektiv længde 40 cm.



IQ6014.XX HYDROFILT LUER LOCK UDEN VÆSKE

IQ6014.12
 IQ6014.14

Hydrofilt kateter uden væske, med luer lock. Aktiveres med 0,9 % saltvandsopløsning eller vand. Funktionel emballage, steril. Total længde 43 cm, effektiv længde 40 cm..



De to sidste cifre i produktnummeret angiver Charrière-størrelsen. Katetrene er pakket i æsker med 30 stk.



Den unikke bøjelige kugleformede spids styrer kateteret forsigtigt og sikkert gennem urinrøret. IQ-Cath passerer også godt gennem en spastisk lukkemuskel (sfinkter).

Kateterets ekstra lange konektor giver et bedre greb og nemmere håndtering.




IQ2902.XX HYDROFILT KATETER UDEN VÆSKE

IQ2902.10 Hydrofilt kateter uden væske. Aktiveres med 0,9 % saltvandsopløsning eller vand. Peel-open emballage, steril. Total længde 17 cm, effektiv længde 12 cm.
 IQ2902.12
 IQ2902.14





IQ2302.XX HYDROFILT KATETER I VÆSKE, KLAR-TIL-BRUG

IQ2302.10 Hydrofilt kateter i væske, 0,9 % saltvandsopløsning. Klar-til-brug med det samme. Peel-open emballage, steril. Total længde 17 cm, effektiv længde 12 cm.
 IQ2302.12
 IQ2302.14

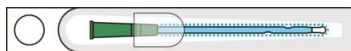


De to sidste cifre i produktnummeret angiver Charrière-størrelsen. Katetrene er pakket i æsker med 30 stk.

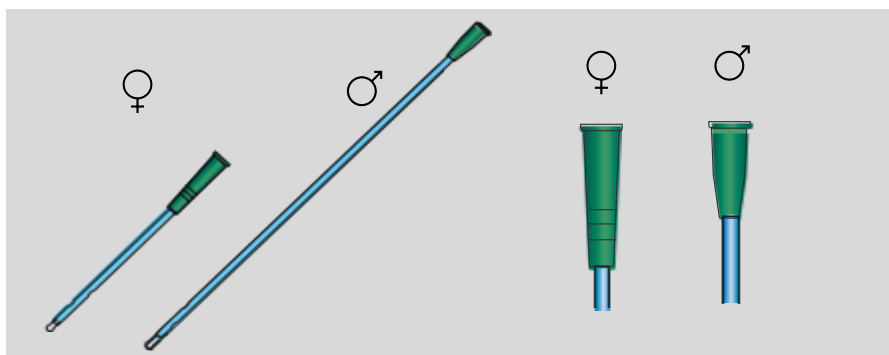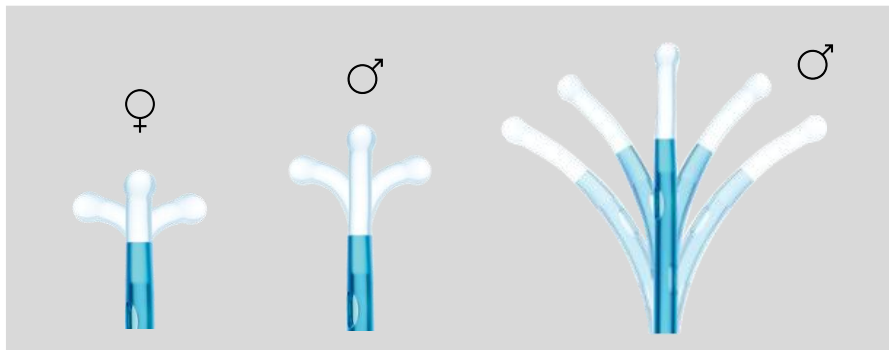

IQ2303.XX HYDROFILT KATETER I VÆSKE, KLAR-TIL-BRUG

IQ2303.10
IQ2303.12
IQ2303.14


Hydrofilt kateter i væske, 0,9 % saltvandsopløsning. Klar-til-brug med det samme. Peel-open emballage, steril. Total længde 33 cm, effektiv længde 30 cm.

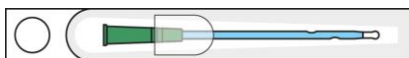

IQ4303.XX HYDROFILT KATETER I VÆSKE, KLAR-TIL-BRUG, MED SLEEVE

IQ4303.10
IQ4303.12
IQ4303.14

Hydrofilt kateter i væske, 0,9 % saltvandsopløsning. Klar-til-brug med det samme, med sleeve. Peel-open emballage, steril. Total længde 33 cm, effektiv længde 30 cm.

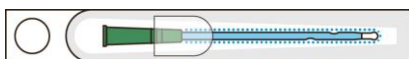


De to sidste cifre i produktnummeret angiver Charrière-størrelsen. Katetrene er pakket i æsker med 30 stk.

EMBALLAGE

FUNKTIONEL EMBALLAGE – til alsidig brug.

Den funktionelle emballage kan bruges som en forlængelse til at tømme urinen direkte i toilettet. Før konnektoren mod spidsen for at tætte posen.

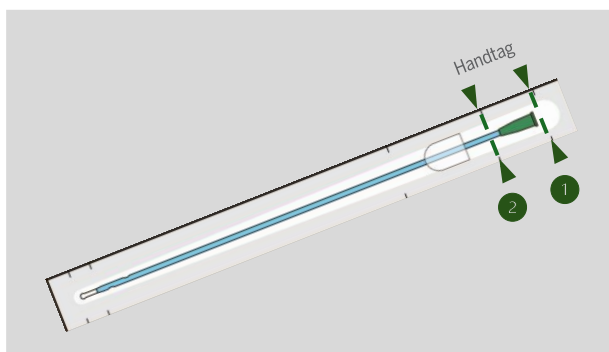

Perforeringer

- ▼ Riv af her
- ① Åbning
- ② Riv af med et ryk ved markeringerne for at skabe et håndtag, som kan bruges ved indføringen.


PEEL-OPEN EMBALLAGE – for nemhedens skyld.

Peel-open emballagen er let at åbne. Huller til fingrene gør det nemmere at åbne emballagen uden at berøre kateteret.



IQ CATH

MED BØJELIG OG FLEKSIBEL KUGLEFORMET SPIDS – SIKKER OG PÅLIDELIG VED INTERMITTERENDE KATETERISERING

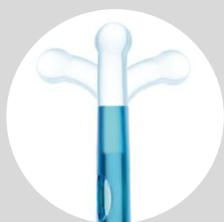


KUGLEFORMET SPIDS

Den unikke kugleformede spids med bøjelig "nakke" styrer kateteret forsigtigt og sikkert gennem urinrøret.



BLØDE ØJNE

Kateterets øjne er afrundede for at forhindre skader på urinrørets følsomme slimhinde.

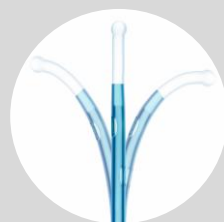

FLEKSIBELT KATETER

Den kugleformede spids og fleksible zone, efterfulgt af det forholdsvis stivere skaft, gør IQ-Cath nem at indføre og udøver lille tryk mod urinrørsvæggen.

Fremstillet af Manfred Sauer
Medicinskudstyr Klasse II



ER DER NOGET, DU UNDRER DIG OVER? VI HJÆLPER DIG GERNE!

Berner Medical er en pålidelig partner for sundhedspersonale. Vi forbedrer livskvaliteten ved at tilbyde løsninger, der støtter menneskers velvære og funktionsevne. Vi betjener offentlig og privat sundhedsvæsen, plejesektoren og virksomheder specialiseret i professionel rengøring. Vores styrker er et omfattende produktsortiment, leveringssikkerhed, produktuddannelse og tværfaglig ekspertise.

Besøg os gerne på www.bernermedical.dk

BERNER

MEDICAL